



باتری سمعک زیمنس شماره ۶۷۵

نوع تکنولوژی: روی-هوا



این باتری برای
سمعک های پشت گوش می باشد.

ساخت آلمان

با ماندگاری طولانی

تعداد باتری های موجود در پیک : ۶ عدد

bigazand.com



دسته بندی می شوند.

سایز



باتری ها بر اساس

کد



سایز بندی بستگی دارد به :



اینکه برای سمعک های درون گوش

استفاده شوند و یا سمعک های بیرون گوش

✓ بطور کلی باتری های سمعک در ۴ اندازه دیده می شوند:

۱۰، ۱۳، ۳۱۲ و ۶۷۵

bigazand.com



باتری های سمعک درون گوش:

کدهای ۱۰ و ۳۱۲

باتری های سمعک بیرون گوش:

کدهای ۱۳ و ۶۷۵

❗ سمعک های داخل گوش ، باتری های ریزتری احتیاج دارند .

◆ باتری سمعک سیگنیا کد ۶۷۵

دارای بزرگ ترین اندازه برای باتری است .

◆ بسته بندی این محصول به رنگ آبی بوده

و هر بسته دارای ۶ عدد باتری می باشد .

bigazand.com



ولتاژ: ۱/۴۵

قطر: ۱۱/۶ میلی متر



این اندازه تقریباً دو برابر
باطری های ریزی مثل باتری کد ۱۰ می باشد.



به محض جدا کردن باتری و چسب ،
فعالیت های شیمیایی آغاز می شوند
و می توان آن را درون سمعک قرار داد

bigazand.com

جهت بهبود عملکرد:

بعد از جدا کردن برچسب ، حدود ۱ الی ۲ دقیقه صبر کرده و سپس باتری را درون سمعک قرار دهید تا فعالیت های آن به طور کامل آغاز گردند .

به محض جدا کردن برچسب << فعالیت باتری آغاز می شود

توصیه: تنها در زمانی این کار را انجام دهید که قصد استفاده از محصول را داشته باشید

هنگام قرار دادن باتری درون سمعک ، مطمئن شوید که هیچگونه آلودگی و جسم خارجی در محفظه ی باتری قرار نداشته باشد .



این امر موجب می شود تا اتصال الکتریکی به خوبی انجام نشده و در عملکرد محصول اختلال ایجاد شود .

bigazand.com

بهترین دمای نگهداری :

3

در دمای اتاق بین ۱۰ الی ۲۵ درجه سانتی گراد

محصول باید حتما از دسترس

کودکان و پت های خانگی دورنگه داشته شود



چون سایز کوچک آن باعث می شود به راحتی بلعیده شده و مشکلات بسیاری را ایجاد کند



بابی گزند، بی گزند بمانید

bigazand.com